

**MODELO:** MM-9205+AURA

---

**CARACTERÍSTICAS CLAVE:**

- Aprobación NIOSH N95
  - Clip nasal ajustable
  - Espuma nasal
  - Estilo de plegado de 3 paneles
  - Bandas de sujeción para la cabeza engrampadas
  - Empaque individual
- 

**MATERIALES:**

- Bandas de sujeción para la cabeza — poliisopreno
  - Grampas - acero
  - Clip nasal — aluminio
  - Espuma nasal - poliuretano
  - Filtro — polipropileno
  - Cubierta — polipropileno
  - Este respirador no contiene componentes hechos de látex de caucho natural
  - Peso aprox.: 10 gramos
- 

**PAIS DE ORIGEN:**

Hecho en EE. UU., Singapur o Canadá

---

**USAR PARA:**

- Partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan 10xLEO (límite de exposición ocupacional)
  - Seguir siempre las instrucciones para el usuario y utilizar de la manera allí indicada
- 

**NO USAR PARA:**

- Gases y vapores, aerosoles aceitosos, asbestos, arsénico, cadmio, plomo, 4,4-metilén di anilina (MDA) o limpieza abrasiva
- Concentraciones de partículas que excedan 10xCMP (límite de exposición ocupacional) o que sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH)
- NO utilizar de ninguna manera no indicada en las instrucciones para el usuario



**EMPAQUE: 440 PIEZAS**

**APROVACIONES Y ESTÁNDARES:**

- Respirador para partículas NIOSH N95
  - Cumple con los requisitos de NIOSH 42CFR84 de los EE. UU., para una eficiencia de filtración mínima del 95a contra aerosoles sólidos y líquidos que no contengan aceite.
  - Número de aprobación NIOSH TC-84A-8590
  - Factor de protección asignado (FPA 10) por OSHA de EE. UU. y CSA de Canadá
- 

**LIMITACIÓN DE TIEMPO DE USO:**

Reemplazar el respirador cuando se ensucie, dañe o se dificulte la respiración a través de éste.

---

**VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO:**

- 5 años desde la fecha de fabricación
- Fecha de manufactura en la caja en formato AAAAMMDD
- Guardar los respiradores en el embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.
- Almacenar a temperaturas entre -20°C y +30°C y que no exceda el 80a de HR



**¡ADVERTENCIA!**



**PROTOCOLOS ACEPTABLES DE PRUEBAS DE AJUSTE:**

\*Referirse a la OSHA 1910.134

Este respirador ayuda a reducir la exposición a ciertos contaminantes presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las instrucciones para el usuario proporcionadas como parte del embalaje del producto. Seguir las regulaciones locales. En algunos países como los EE. UU., se debe implementar un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con los requisitos de la OSHA 1910.134, incluyendo capacitación, pruebas de ajuste y evaluación médica. El mal uso puede provocar enfermedades o la muerte. Para el uso correcto, consultar al supervisor, las instrucciones para el usuario o contactarse con 3M a [leadhandlerspsd@mmm.com](mailto:leadhandlerspsd@mmm.com)

Protocolo de prueba de ajuste*		¿Aceptable con este respirador?
Protocolos cualitativos	Sacarina	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bitrex™	<input checked="" type="checkbox"/>
	Humo irritante	<input type="checkbox"/>
	Acetato de isoamilo	<input type="checkbox"/>
Quantitative Protocols		<input checked="" type="checkbox"/>

**ACLARACIÓN:**

La información contenida intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a Espomega S. de R.L. de C.V. en Pablo A. González Garza #820 pte. Col. Chepevera, Monterrey N.L. México, C.P. 64030, Conmutador (81) 8040-7070, Monterrey 01-800-70-DERMA, México 01-800-01-DERMA. R.F.C. ESP0401151D0. Hecho en China.